

不織布2~4層
ノーズワイヤー付



立体マスク

700円 (税別)

手作り セット...♪...

フォーケア タオル ... 20枚
ワイヤータイ ... 20本
説明書(QR動画3本) ... 2枚
簡易マスク型紙 ... 1枚



素材のみ〈20枚〉 600円 (税別)

布マスク 等の
インナー でもOK!

手作りマスク...約60枚できます!

—お客様 手作りマスク 情報— フォーケアタオル使用 2020.4.11改定

1. 取説参考、型紙を使用

デコレーションでオリジナル♪



2. オリジナル型紙で作成

耳掛けは、素材の伸びない方向で輪を作り絞って調整できる工夫をしています。



3. 取扱説明を参考に、4層の立体マスク、ノスワイヤーを付けてミシン仕上げ。



4. 型紙を使用。2層に重ねシーラーで熱圧着して作成しています。



不織布の端材2枚をインナーに挟んで4層マスク

高級シーラーは...ストレスなく圧着！ 価格がネック....

手作りマスクセット:700 円で 約60枚できます。

フォーケア タオル ...20枚
ワイヤータイ ...20本
簡易マスク型紙 ...1枚
説明書:初級～上級 ...2枚
(手作り動画QR3本)



5. ユーザーオリジナル♪



フォーケアタオルで 立体マスク

for care

手作りマスク…初級・中級編

アイデアで…オリジナルマスク♪

【注 意】


R2.3.24 作成

遮断率や透過率等試験は実施していません。
簡易的マスクですので、任意での作成とご使用
をお願いします。

手縫いやテープ等で仕立て下さい。ホチキス留
のマスクは任意でご使用下さい。
ホチキスで作成の簡易マスクはお子様には危険
ですので使用しないで下さい。

(有)ビューティフルライフ:097-546-0666

《パターン1》中田様(大阪府)提供。1枚のフォーケアタオルで3～4枚マスクができます。

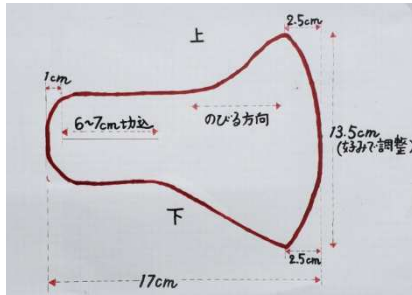

手作り動画(2)

中田様 提供♪
Ver.2



2枚重ねて完成!

内側に端材を重ねてもOK♪



中央の接着は
テープを使用。
縫い合せてもOK



《パターン2》YK様(大分県)提供。1枚のフォーケアタオル重ねて2枚、単体で4枚できます。

フォーケアタオルを使った 立体マスク 初級～中級編
超簡単マスクの作り方♪ ユーザー様等の提供情報です!




手作り動画(3)

Ver.2




●手作りマスクセットには、
型紙なども付いてます♪

素材の伸びる方向を
良く確認して下さい。

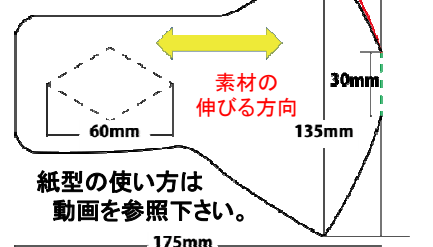

紙型の使い方は
動画を参照下さい。

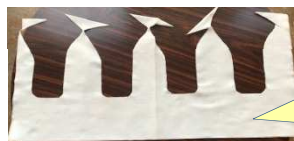


端材はマスク
のインナー。
何層でもOK♪





《パターン3》山口様(鹿児島県)提供。1枚から1層マスクで6枚位できます。

●左右2枚重ねて切り取り、中央で縫付けた2層マスク。手芸用ゴムを耳かけに使用。

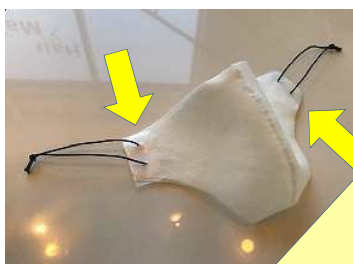

黄色の
⇒矢印

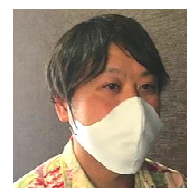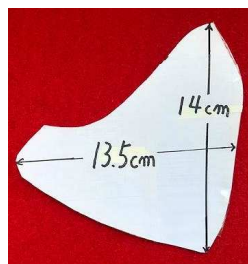

マスクの両端の耳かけヒモを通す部分はテープで補強しています。




★マスク手作り動画★

注意 遮断率等試験は実施しておりません。簡易的なマスクですので、任意での作成・ご使用をしてください。

ノースワイヤー付 **立体マスク**の作り方

★フォーケアタオル1枚で、3枚の4層立体マスクが作れます★

【準備するもの】1. フォーケアタオル1枚 2. ハサミ 3. ホチキス 4. ワイヤータイ **注1** 5. 針と糸
【作り方】**黄矢印**は伸びる方向です。**赤矢印**は、手順です。**白矢印**は、ノースワイヤーのホチキス留めです。

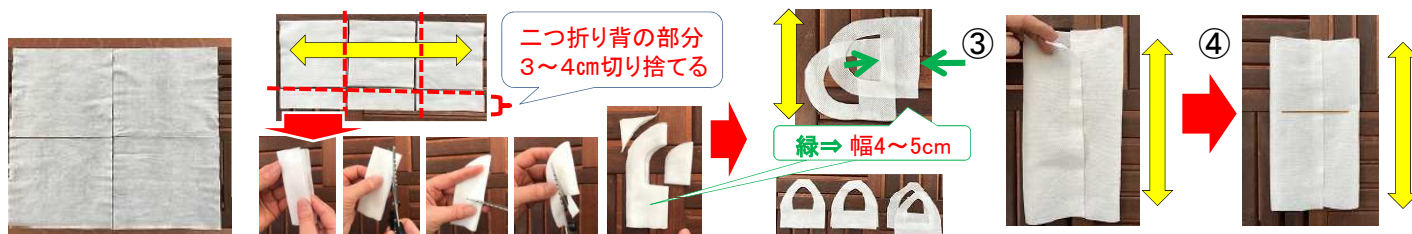

- ① フォーケアタオルを4等分に切る。
② 耳かけ作成。1枚を半分に折り3等分に切る。6枚(左右3組)の背の余白部を切る。1組ずつくり抜く要領で耳かけを作成。
注2:⑥で本体と合わせる部分。耳かけ幅と顔の幅を想定。・装着時サイズ調整をする部分です。
③ 3枚は本体です。中心で1箇所重ねる様に両端を合わせる。
④ 上から9箇所程の位置に、ワイヤータイを配置。※ノースワイヤー部。



- ⑤ ワイヤータイの位置で折返し、タイの両端を1〜2箇所残してタイと重ねてホチキスで固定する。ホチキスの外向/内向を決めてとめる。**注4**参照
⑥ 耳かけ部分を間に挟み、ワイヤー側の両端2ヶ所をホチキスでとめる。**注3:**緑⇒耳かけ(左右)を本体に挟む時1〜2箇所余裕を持たせる...マスクと頬の隙間が一部。



- ⑦ 下側を1箇所、内側に折込み両端をホチキスでとめる。
⑧ 中央が筒状(Ω形状)になる。プリーツになる部分。1〜2段プリーツを選択できる。
⑨ 筒状部分の中央でプリーツを作りホチキスで留めます。手縫いで仕上げてご使用下さい。


マスキングテープでのホチキス養生(例) **注1**ラッピング用ワイヤータイ↓

【仮留完成】
表面



裏面

裏面も縦に伸ばすと顔にフィットします。黄色⇒

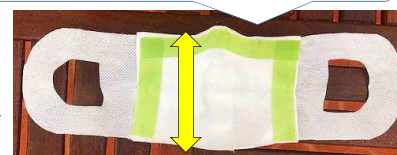

手縫いでのマスク作りをお勧めします！

- 【注】** ホチキス留のままマスクとして使用する場合は、任意でご使用下さい。
【意】 ホチキス使用でのマスクは、お子様には危険ですので、使用しないで下さい。 R2.3.24 作成

ポイント: 耳に掛ける時、耳かけ部の伸ばし具合で隙間が出来ないように装着・調整して下さい。耳かけ作成②での幅決めと伸ばし具合でサイズ調整して下さい。

・耳かけは伸びない方向を横に作ることを推奨。伸びたら、紐を結ぶ・クロスがけ等で再調整。
(有)ビューティフルライフ :097-546-0666



注文日:令和 年 月 日

有限会社ビューティフルライフ 御中

※注文はこちらまで...

FAX 097-546-6999

0407改定

下記の通り注文をお願い致します。



フォーケアタオル 一般顧客様 専用注文書

①注文内容

※請求金額には別途送料と消費税がかかります。

商品名		内 容	注文単位	注文数	希望小売価格	備 考
手作りマスクセット	A	・フォーケアタオル.....20枚 ・ワイヤータイ.....20本 ・簡易マスク参考型紙・1枚 ・説明書(手作り動画QR3本)	1個 20枚(1セット)		700	4/8より企画内容が変更になりました。 Aセット5個お買い上げ毎に見本の 手作りマスク を1枚プレゼントいたします。
	B	フォーケアタオル(素材)のみ ※セットは付きません。	1個 20枚(セットなし)		600	

注:商品には限りがございます。在庫がなくなり次第終了とさせていただきますのでご了承ください。

注:理・美容分野または医療・介護分野には代理店もございます。業務用として弊社へお問い合わせください。

②送 料

配送料一覧表

		(税別)											
商 品	梱包	南九州 熊本県 宮崎県 鹿児島県	北九州 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県	四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県	中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県	関西 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山	北陸 富山県 石川県 福井県	東海 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県	信越 新潟県 長野県	関東 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県	南東北 宮城県 山形県 福島県	北東北 青森県 岩手県 秋田県	北海道
【 タオル 】													
タオル	1個	梱包料込	600										
	2個	梱包料込	800										
	3~4個	梱包料込	850	950	1,200	1,400	1,800						
	5個 (100枚)	梱包料込											

※沖縄・離島につきましては別途ご負担頂きます。※1梱包当たりの料金となります。※ご請求時には、別途消費税が加算されます。

お支払金額

①商品金額

+

②送料

+

③消費税①+②×10%

=

合計金額(①+②+③)

お支払口座

※お振込手数料はご負担お願い致します。

お振込予定日

大分銀行 ソーリン支店 普通口座 5281960

口座名義 (有)ビューティフルライフ 代表取締役 田中晃一

月 日

●商品送り先(納品先) ※商品の発送は入金確認後となります。

店名		ご担当者	
TEL		FAX	
ご住所	〒		

有限会社 ビューティフルライフ
0407改


型紙の使い方

赤線：①ノーズワイヤーを付ける時の折返し部

②大きめに作る時の目安

黒線：マスク基本サイズ

緑線：素材を二つ折りで切りぬく時の折返し線

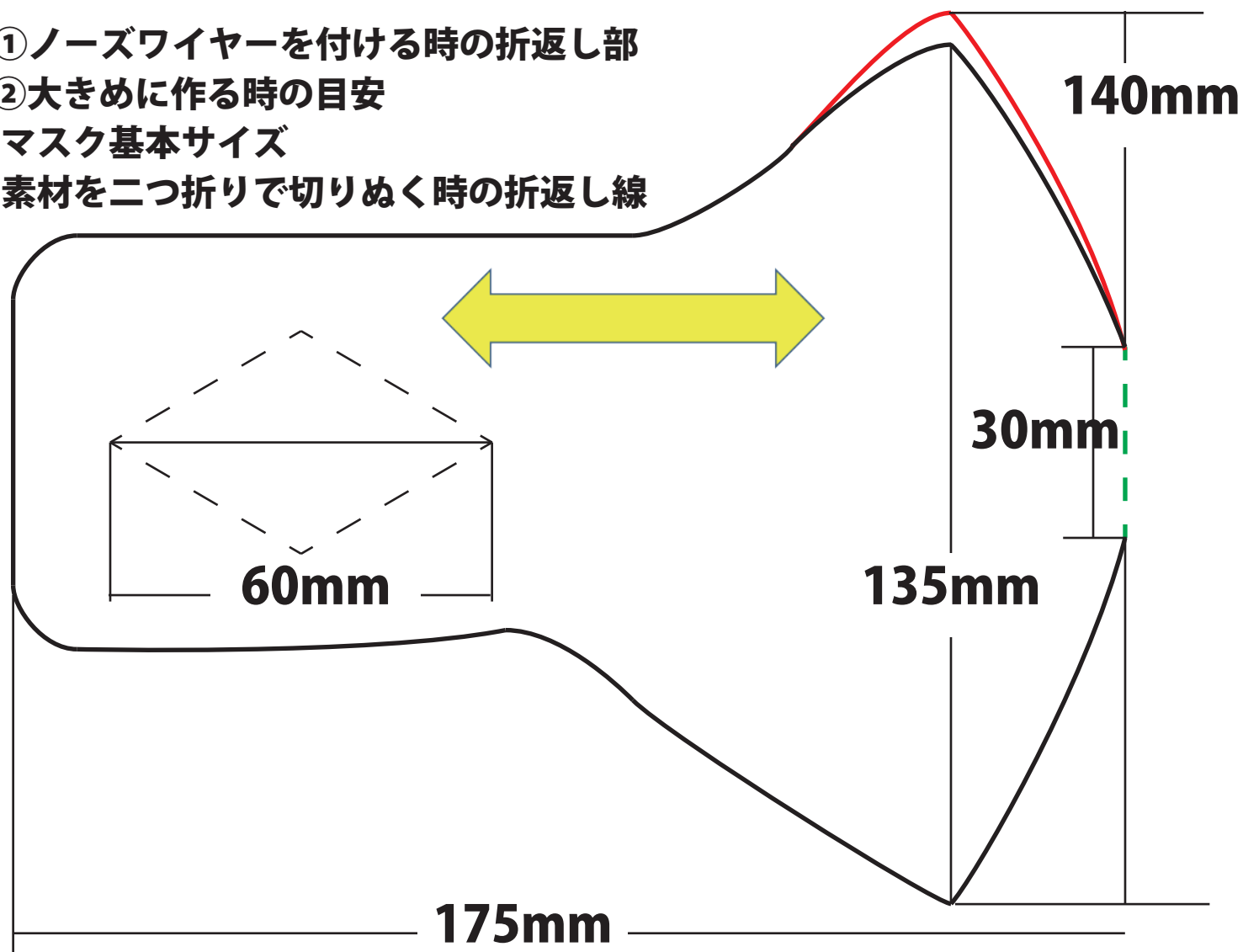

ディスポーザブル
スパンレース

フォーケア タオル

大判
タイプ

－ 丈夫で柔らかい使い捨てタオル －



医療・介護・福祉理美容の現場に・・・
サービスと衛生管理の質を向上

フォーケア タオル【BL-DFT】

希望小売価格

業務 販売単位：1箱/100枚×8袋

一般：1袋/100枚 3,000円 [税別] @30

高齢者や障がいのある方々の超高齢化・・・ 衛生対策は・・・

体力や免疫力の低下した方々への、安全・安心・快適な
サービス提供に衛生管理は欠かせない重要な課題です。

【使用事例：未滅菌です。使用できる範囲でご活用ください。】

滅菌 ガーゼの上から、浸出液を受けるカバー（保護）に使用等。

胃ろう 周辺の清潔。栄養剤の漏れを受ける…シーツを汚さない。

手・足 等に、伸縮を活かして巻きつけて使用する…等。

美容・理容 整髪タオル：刈毛が繊維に絡み背中に入り難く衛生的。

配膳 テーブル拭き等として使用。…汚れが目立ったらディスポ。

清掃 モップに合わせて取替シートに。アルコールなど噴霧可。



展開サイズ：500mm×600mm
※誤差：±10mm
素材：レーヨン・PET 不織布

ご使用上の注意

●目および目のまわりには使用しないでください。 ●お肌に異常のある場合やお肌に合わない場合は、ご使用しないでください。
●電子レンジ等でのご使用では、必要以上の過熱はご遠慮ください。 ●必要以上の加熱、おしぼりウオーマー内での放置はご遠慮ください。
注：流しや水洗トイレには流さないでください。 水に溶けにくいので、パイプ詰まりの原因になります。

2020.3.10作成

お問い合わせ先：販売元

Beautiful Life
ビューティフルライフ

有限会社ビューティフルライフ

TEL:097-546-0666

〒870-0829 大分県大分市権迫4組の2

e-Mail: info@be-life.info

Web: http://www.be-life.info

フォーケア® タオル

ディスポ タイプ / スパンレース

●医療・介護・福祉理美容の現場で、使用されています。【未滅菌です】


特徴

- 十分に伸ばすと…汚れや埃の付着がアップします。
- お掃除シートとして…掃除モップ、台拭き等に使用。
- 通常のタオル等として…洗って繰り返し使用できます。
- 綿タオルと比較…汚れ吸着は良い。吸水性は落ちます。

1箱：800枚（8袋）
1袋：100枚入

サイズ：
約600mm×約500mm

※寸法誤差：±10mm

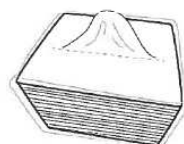

(1)1袋100枚入。(2)中央ミシン目を開きます。(3)ミシン目から引き出します。 <<伸びる側：約500mm>> <<伸びない：約600mm>>

導入事例

医療機関…創傷ケア等患部処置で滅菌ガーゼの上から浸出液のカバー（保護）用として使用する等。
胃ろう周辺の清潔や栄養剤の漏れを受けてシーツをガード。【注：未滅菌で使用可能な範囲】
訪問看護…手・足などに伸ばしながら圧をかけて巻く等。 家族が療養者用に洗濯して数回使用する。
介護施設…配膳用、テーブル拭き等として繰り返し使用し目視で汚れが目立ったらディスポする。
訪問理美容…整髪用タオル等で使用。刈り毛が繊維に絡み背中に入り難く衛生的。 清掃シートに使用。
病院・施設・在宅…掃除モップの大きさに合わせて取替シートとして使用。アルコール等を噴霧して使用。


タオルの大きさは、使用用途に応じて自由にカット出来ます。 ※以下、カット例

伸びる側/伸びない側を確認して、用途に応じて切ってください。


【注意】1/2、1/3、1/6に切る場合、方向により伸縮する面が違います。




<<1/2カット>>

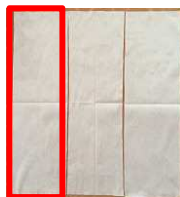


<<1/3カット>>

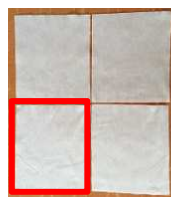

<<1/4カット>>

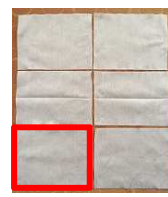

<<1/6カット>>

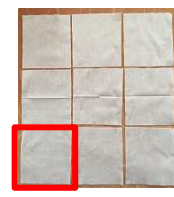


<<1/9カット>>

使用例① 厚手タオルとして




- タオルを伸びる方向に引っ張り十分に広げて、大判タオルや厚手のタオルとして使用する。

使用例② 薄手タオルとして

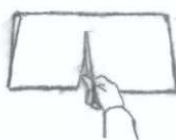


- ①伸びる方向、伸びない方向を確認して、用途に応じてカット。

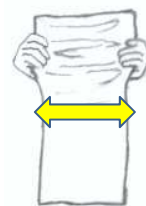

- ②伸びる方向に十分に伸ばすと汚れや埃の付着や吸水性がUPします。

使用例③手で裂く(切る)

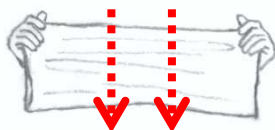

- 伸びない側から、手で裂けます。⇒点線の赤矢印自由に裂いて使用できます。

必要に応じて小さく切ったタオルを、別のビニール袋に詰め替えると使い勝手が良いです。



- 取出し面に、ハサミやミシン目カッターで切れ込みを入れると便利です。